

PELVI-UP



PelviCenter

Rééducation du plancher pelvien

Automatisée, Robotisée, Non invasive, Passive

Prévenir, Préparer, Rééduquer, Muscler, Tonifier, Décontracter, Récupérer,
Optimiser, Automatiser, Faciliter, **Economiser...**



THE JOURNAL
UROLOGY®



Medical devices

Directive 93/42/EEC

Commission communication in the framework
of the implementation of the Council Directive
OJ C 173 of 13/05/2016



La technologie au service de l'incontinence

Présentation SOCIETE QRS

Le PelviCenter est fabriqué par la société QRS

<http://qrs-international.com>



- QRS Quantum : Fondée en 1990 par le Professeur Fischer en Allemagne.
- **Il s'est intéressé aux diverses thérapies de champs magnétiques comme alternative à la médecine classique et a fondé son entreprise.**
- QRS conçoit et fabrique en Allemagne et distribue des dispositifs médicaux à technologie de champs magnétiques dans le monde entier (Europe, Asie, Etats-**Unis, Océanie**), **technologie d'avenir utilisée** prochainement pour différentes thérapie.
- Le savoir-faire de QRS réside dans la maîtrise des champs électromagnétiques pulsés de faible intensité **avec une connaissance approfondie de l'effet biologique des champs magnétiques pulsés sur l'organisme** humain. <http://qrs-international.com> (littérature sur le site)
- QRS International compte 33 **enregistrements internationaux pour 11 marques et 5 brevets délivrés. D'autres brevets sont en attente.**
- Pelvi-**Up distributeur exclusif pour la France, plusieurs pays d'Europe, l'Afrique du Nord...**



- <https://www.auajournals.org/doi/10.1016/j.juro.2016.11.091>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4477591/>
- <http://pelvi-up.fr/wp-content/uploads/2018/01/ETUDE-FRANCAISE.pdf>
- <https://www.bangkokhospital.com/en/package/urology/qrs-pelvicenter>
- <https://www.youtube.com/watch?v=lul2-3cde>



POURQUOI PELVICENTER : DES CONSTATS, LA SITUATION


Toujours autant d'incontinents qui ne se soignent pas, tous les medias en parlent, encouragent à porter des protections hygiéniques au quotidien, on formate les jeunes filles ou les femmes avec les publicités TV ou magazines féminins.... C'est la fatalité !

Mais la situation n'évolue pas, on tourne en rond, toujours autant de consommation de protections hygiéniques de tous types

4 à 5 millions d'incontinents en France (hommes, femmes)
80 000 opérations de la prostate

A peine 1/3 se soignent, les autres passent aux travers des mailles
Ou n'ont pas trouvé de solutions

Un marché de plusieurs milliards de protections hygiéniques qui échappe au corps médical

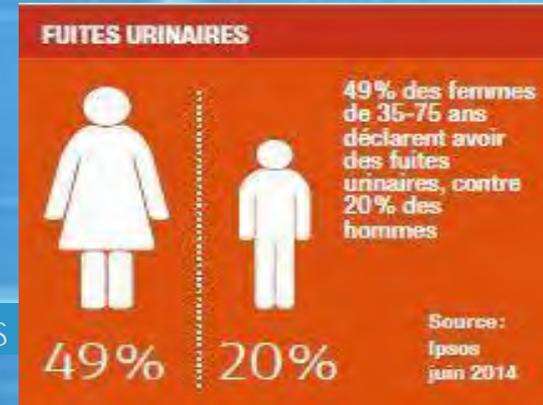

Les moyens existants :

La rééducation fonctionnelle du plancher pelvien vise à assurer la persistance d'une fonction périnéale correcte : statique, continence, harmonie sexuelle. Les traitements s'effectuent à titre préventif et curatif. Les modes d'action se rapportent aux propriétés musculaires et neuromusculaires de la sphère périnéale. Différentes techniques se combinent : information, travail musculaire intracavitaire, pratique du biofeedback et de l'électrostimulation, gestion de la pression intra-abdominale....manuel ou automatisé



A faire à la maison, stimulation par patch
Vente sur internet, pharmacie



PELVICENTER Automatique, habillé,
appuyé par des études avec la
garantie de travailler la zone
20 minutes la séance
Pour Tous les ages
Sous control d'un praticien

Sonde intracavitaire, rééducation sur une zone localisée



Assistance d'une sage Femme, d'un kinésithérapeute 30 à 45 minutes la séance



LE PELVICENTER : Champs d'application

CHAMPS D'APPLICATION DU PELVICENTER

Le PelviCenter est une nouvelle façon, non invasive, facile et hautement efficace, de travailler et de renforcer le plancher pelvien.

Tous les troubles de la statique pelvienne peuvent être traités par le PelviCenter. Il est donc sujet d'intérêt pour les :

Urologues

Gynécologues Obstétriciens

Gastro-entérologues/Proctologues

Chirurgiens digestifs

Kinésithérapeutes

Sagès-femmes

INCONTINENCE

Femmes : effort, impériosité, etc...
Hommes : en particulier après oblation de la prostate (prostatectomie).
Incontinence fécale.

PRÉVENTION

Avant/après une cure de prolapsus génito-urinaire.

DOULEUR DE DOS

En particulier pour les douleurs du bas du dos et au niveau des vertèbres lombaires.

TROUBLES NEUROLOGIQUES

Vessie neurologique, névralgie (neuropathie pudendale).

QUELLES SONT LES PERSONNES ÉLIGIBLES AU PELVICENTER ?

Personnes âgées : en particulier présentant des troubles de la statique pelvienne.

Femmes : en particulier pour la rééducation du périnée, post-partum.


Sportifs : en particulier de haut niveau, avec une sollicitation importante du plancher pelvien

Hommes : avant et après prostatectomie, incontinence urinaire et fécale.

① The ideal magnetic field position can be adjusted to suit the patient's size.

② The backrest reclines to ensure a more comfortable sitting position, specifically for obese patients.

③ The footrest can be raised for a more comfortable sitting position and to relax the thigh muscles.

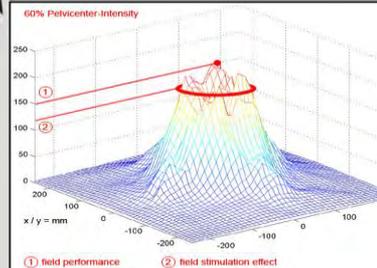

- Le patient s'assoit **sans se déshabiller**
- La séance dure 20 mn, sans besoin d'assistance
- De 8 à 16 séances à raison de 2 à 3 séances / semaine
- Traitement entièrement automatisé, le patient et le praticien n'ont rien à faire, le patient sent ses muscles se contracter fortement
- La fréquence, la densité, la durée des impulsions et la récupération de la zone à traiter peuvent être modulées à volonté en fonction de la pathologie.
- 6 niveaux de puissance.

Les OMP pénètrent de 16 cm dans la zone sollicitée

La bobine se déplace de 16 cm horizontalement, des ischio jambiers

à la zone lombo-sacrée, ce qui permet de rechercher et de se concentrer sur la zone souhaitée et d'avoir un large champ d'application

Le PelviCenter utilise la stimulation magnétique extracorporelle.

Le système est implanté dans le siège Habillé, Assis, Passif, Robotisé, Automatisé

- Incontinence Urinaire d'Effort
- Rééducation et réhabilitation périnéale Post Partum
- Prolapsus
- Sécheresse vaginale
- Incontinence fécale
- Troubles et dysfonctionnements sexuels
- Renfort, tonicité, développement du plancher pelvien
- Trouble de la statique pelvienne
- Pré & Post Prostatectomie (Dysfonction érectile / Incontinence Urinaire)
- HBP ou Hyperplasie Bénigne de la Prostate
- Rééducation Uro-Gynécologique
- Douleurs bas lombaires, musculation et renforcement fessier et ischio-jambier
- Prévention et récupération de la pubalgie



LES PRATICIENS : Pour qui ?

Le PelviCenter s'adresse :

- aux kinésithérapeutes, sage-femmes,
- aux chirurgiens, gynécologues, urologues, chirurgiens digestifs, viscérale
- aux gynécologues, gastro-enterologues, proctologues.....
- aux médecins, gériatres
- aux centres de pelvipérinéologie
- aux centres de rééducation uro-gynéco
- aux centres spécialisés en périnatalité
- aux praticiens impliqués dans la statique pelvienne
- aux centres sportifs professionnels
- aux EHPAD, centres de gériatrie, cliniques, hopitaux
- aux centre de thalassothérapie, balnéothérapie



LE CONCEPT / LA TECHNIQUE EN PRATIQUE

- Le patient s'assoit **sans se déshabiller**,
- La séance dure 20 mn, sans besoin d'assistance
- Le protocole est de 8 à 16 séances à raison de 2 à 3 séances
- Le traitement est entièrement automatisé et le patient n'a rien à faire, le patient sent ses muscles se contracter fortement ou se relaxer, se décontracter...
- La fréquence, la densité, la durée des impulsions & contractions, la durée de récupération, la zone à traiter peuvent être modulées en fonction de la pathologie, du besoin
- La densité magnétique se programme sur 6 niveaux de puissance.
- La durée du travail musculaire, de contraction et récupération sont réglables



Les Bénéfices, Avantages, Arguments ?

⇒ Permet de démultiplier la performance d'un soin « TABOU et inconfortable », à tout ceux qui refusent de se soigner et les moyens invasifs, hommes, femmes

⇒ En Résumé : Non Invasif, habillé, Passif, Robotisé, Automatisé, Puissance de pénétration, travail sur l'ensemble musculaire, Polyvalence, Largeur des champs d'action, Economique

1/ Qualité, facilité, rapidité, efficacité, confort du soin, pudeur, hygiène, accessibilité

2/ Economie : améliore les interventions chirurgicales, préparation et récupération plus rapide

3/ Economie de l'usage de protections (couches, serviettes hygiéniques, pollution, traitements chimiques...)

4/ Economie de place : pas besoin de pièces pour l'intimité, pas de nettoyage de l'outil

5/ Economie : Gain de temps et organisation : déshabiller, rhabiller, nettoyage des sondes, meilleure hygiène

6/ Economie : Séances de 20 minutes vs séance de 30 à 45 minutes (Kinésithérapeute, sage femme.....)

7/ Préparation d'intervention & Récupération accélérée après intervention : arrêt de travail réduit après Prostatectomie

8/ Résultat rapide et facile, puissance de l'outil qui obligatoirement fait travailler toute la zone pelvienne


9/ Récupération de la proprioception permet de réduire le nombre de séances de rééducation 7/ Amener les jeunes filles à se soigner, qui ne veulent pas de moyens invasifs

10/ Optimisation de l'outil compte tenu de la largeur des champs d'application (plusieurs médecins et services...)

11/ Protection et prise en charge des enfants, personnes âgées facilité, personnes fortes, mobilité réduite

12/ Personnes qui ne peuvent pas subir d'intervention chirurgicale

Prise en charge
Sécurité Sociale

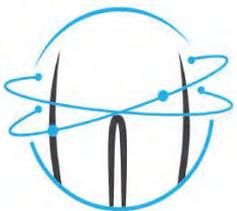

PELVI-UP



Pelvi-Up Vous propose des offres spécifiques PELVICENTER



Offre de Leasing sur 5,6,7 ans, révision la 3^{ème} année après les 2 ans de garantie
Pelvi-Up collabore avec plusieurs société de financement spécialisés dans le financement de matériel médical que nous mettons à votre disposition pour échanger sur les différentes options et solutions les plus adaptées à vos besoins

La technologie au secours de l'incontinence
au service de la performance sportive

Prévenir, Préparer, Rééduquer, Muscler,
Athlétiser, Développer, Tonifier, Décontracter,
Récupérer, Optimiser, Automatiser, Faciliter,
Economiser, Soigner



QRS 1010 Pelvicenter
PLUS



QRS 1010 Pelvicenter
BASIC



- Rééducation et athlétisation du plancher pelvien
- Automatisée, Robotisée, Non Invasive, Passive

Echangeons ensemble sur cette solution innovante & performante



Vos interlocuteurs

Dominique Trouillet
d.trouillet@pelvi-up.fr
06 08 03 58 92
contact@pelvi-up.fr

Pascal Foxonet
p.foxonet@pelvi-up.fr
06 81 55 64 76
contact@pelvi-up.fr

